

*Esta instrução de uso é aplicável aos itens descritos a seguir:*

EBA-5316 - Fio guia; EBA-5301 - Fio guia; EBA-5275 - Alargador canulado, ø16 mm; DT030090 - Obturador; EBA-5320 - Canula cefalica; EBA-5325 - Trocar cefalico; EBA-5327 - Trocar; EBA-5270 - Broca cefalica; EBA-5360 - Fresa cefalica; EBA-5321 - Canula diafisaria; EBA-5326 - Trocar diafisario; EBA-5285 - Broca graduada ø4 mm; EBA-5280 - Broca diafisaria; EBA-5328 - Trocar diafisario canulado; DT03011A - Broca, ø4 mm; EBA-5365 - Extrator; DT030001 - Fio-guia com oliva ø3x800 mm; EBA-5317 - Parafuso de impacto, canulado; EBA-5271 - Broca cefalica XXL (acoplamento); EBA-5286 - Broca graduada, ø4 mm (acoplamento AO); EBA-5380 - Canula cefalica; EBA-5381 - Canula diafisaria; EBA-5385 - Trocar cefalico; EBA-5386 - Trocar diafisario; EBA-5387 - Trocar de fio de estabilizacao; DT030022 - Cânula com alça; DT030025 – Trocar; DT030020 – Cânula; DT03012A - Broca graduada, ø4 mm; DT030026 - Trocar de múltiplos orifícios; DT030052 - Dispositivo de compactação; DT03010H - Fresa canulada, ø12,5 mm; EBA-5276 - Fresa canulada ø16 mm;

## **MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO**

---

Instrumental Citieffe

### **INDICAÇÃO DE USO**

Os instrumentais são indicados para auxiliar cirurgias ortopédicas, permitindo que o cirurgião tenha todo o instrumental cirúrgico necessário e indispensável para realização do respectivo procedimento cirúrgico.

### **PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**

Os instrumentais auxiliam no procedimento de um membro fraturado, ou que necessite de uma intervenção cirúrgica, de acordo com a técnica definida pelo cirurgião.

### **MODO DE USO**

Utilizar os instrumentais conforme técnica cirúrgica definida pelo cirurgião.

### **MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO / LIMPEZA**

Todos os instrumentos são fornecidos em embalagem **NÃO ESTÉRIL** e necessitam ser esterilizados antes de sua utilização. O produto deve ser removido da sua embalagem antes de ser realizada a esterilização. A esterilização pode ser realizada utilizando embalagens adequadas de materiais, de acordo com o processo de esterilização.

Após o ciclo de esterilização proceder ao ciclo de secagem.

Método: Autoclave

Ciclo: Pré-vácuo

Temperatura: 132-135°C / 270-275°F

Tempo de Exposição: 10 minutos (mínimo)

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazene em temperatura entre 10°C e 40°C. E, ambiente seco e fresco com umidade relativa em torno de 30%. Os dispositivos devem ser armazenados em local adequado e não devem ser danificados.

### **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE**

Os produtos devem ser transportados e armazenados em ambiente limpo, arejado, em local seco e fresco com umidade relativa em torno de 30%, a uma temperatura ambiente (10°C-40°C). O transporte deve ser feito de modo adequado para evitar queda ou danos em sua embalagem original.

## CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Os instrumentais novos devem ser retirados da embalagem de transporte antes do armazenamento e/ou inclusive no uso do instrumento e ciclo de processamento. Qualquer capa protetora ou folhas devem ser removidas. Quando o instrumento estiver sendo removido de sua embalagem original, as regras de assepsia devem ser observadas.

### Advertências

Se os instrumentais estiverem com suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou sofrido dano, não pode ser usado e deve retornar para o fornecedor. o mesmo ocorre com a verificação do estado da embalagem, se for verificado o estado de violação ou descaracterização do produto, o mesmo deve ser devolvido ao fornecedor.

### Precauções

Os instrumentos de aço inoxidável podem sofrer corrosão se a concentração de cloreto na água for demasiadamente elevada. A probabilidade de corrosão é baixa, se o conteúdo do cloreto não for superior a um nível de 120mg/1 (equivalente a 200mg/1 Na/C1), a temperatura ambiente. Com o aumento da concentração do cloreto, o risco de corrosão vai aumentar rapidamente também.

#### Fabricado e distribuído por:

**Citiefte S.r.l.**

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno

Bologna – Itália

Tel +39 051 72 18 50

Fax +39 051 72 18 70

**Site: [www.citiefte.com](http://www.citiefte.com)**

**E-mail: [citiefte@citiefte.com](mailto:citiefte@citiefte.com)**

#### Importado e distribuído por:

**Bone Surgical Equipamentos Médicos Eireli.**

C.N.P.J / M.F: 04.408.009/0001-97 I.E.  
110.129.500.117

Rua Vergueiro, n.º 2.016 – 1º e 2º andar -  
Vila Mariana

Cep.: 04102-000 São Paulo - SP

Fone.: (0xx 11) 5904-0215

#### E-mail:

**[bonesurgical@bonesurgical.com.br](mailto:bonesurgical@bonesurgical.com.br)**

---

Representante Legal

Edirlei Novaes

---

Responsável Técnica

Maria Cristina Ferrari Bruzadin

COREN-SP n.º 140236277